



MARQUE: ACTEGY
REFERENCE: REVITIVE MEDIC PLUS
CODIC: 4204921



NOTICE
↓

REVITIVE™

CIRCULATION BOOSTER™

MEDIC
PLUS

FR

Manuel de l'utilisateur

NL

Gebruikershandleiding

DE

Bedienungsanleitung



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L'UTILISATEUR AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT SELON L'USAGE PRÉCONISÉ. SI LES SYMPTÔMES PERSISTENT, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

TESTÉ CLINIQUEMENT SANS MÉDICAMENT
DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa



LEES VÓÓR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR

UITSLUITEND GEBRUIKEN VOLGENS DE AANWIJZINGEN. RAADPLEEG BIJ AANHOUDENDE KLACHTEN EEN PROFESSIONELE ZORGVERLENER

KLINISCH GETEST ZONDER MEDICIJNEN
MEDISCH HULPMIDDEL VAN CLASSE IIa



BITTE LESEN SIE SICH VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES PRODUKTS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

BEFOLGEN SIE DIE ANWENDUNGSHINWEISE. SUCHEN SIE BEI ANHALTENDEN BESCHWERDEN BITTE EINEN ARZT AUF.

KLINISCH GETESTET
MEDIKAMENTENFREI
MEDIZINPRODUKT CLASSE IIa




FR	Manuel de l'utilisateur	3-30
NL	Gebruikershandleiding	31-58
DE	Bedienungsanleitung	59-86

Que contient cette boîte?	4
Pièces et commandes	5
Introduction à REVITIVE Medic Plus	6
Indications d'utilisation	6
Comment fonctionne le REVITIVE Medic Plus	7
Précautions importantes	8
Contre-indications	8
Avertissements, risques et mises en garde	8-11
Instructions d'utilisation	12
Combien de temps devrais-je utiliser REVITIVE Medic Plus ?	12
Étape 1 : Régler le REVITIVE Medic Plus pour la première fois	12
Étape 2 : Configurer l'IsoRocker	13
Étape 3 : Allumer l'appareil REVITIVE Medic Plus	14-15
Étape 4 : Utiliser les repose-pieds	16-18
Étape 5 : Utiliser les Électrodes corporelles	19-23
Étape 6 : Recharger la batterie	24
Étape 7 : Nettoyer et ranger	25
Remplacer les piles et les Électrodes corporelles	25
Dépannage	26-28
Spécifications techniques	28-29
Garantie	30-31

Dès l'ouverture de la boîte, veuillez vérifier que tous les éléments suivants s'y trouvent. Si vous croyez qu'il y manque quelque chose, veuillez contacter le distributeur à l'adresse indiquée au dos de ce livret.


A Adaptateur universel

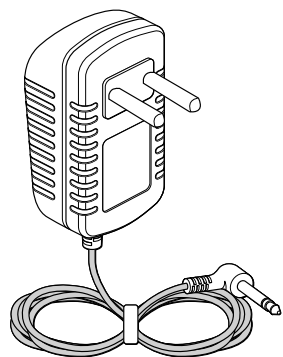

B REVITIVE Medic Plus




C Électrodes corporelles

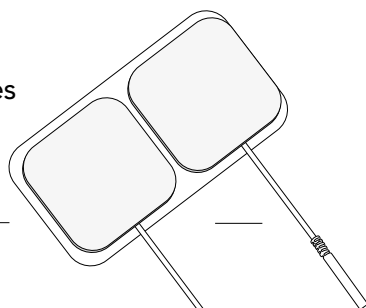


D Cordon des Électrodes corporelles




E Télécommande

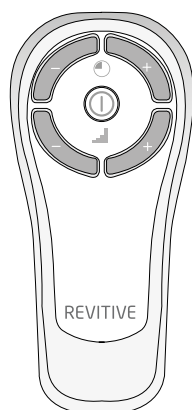


F Piles AAA x 2

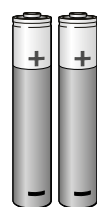

Pièces du REVITIVE Medic Plus

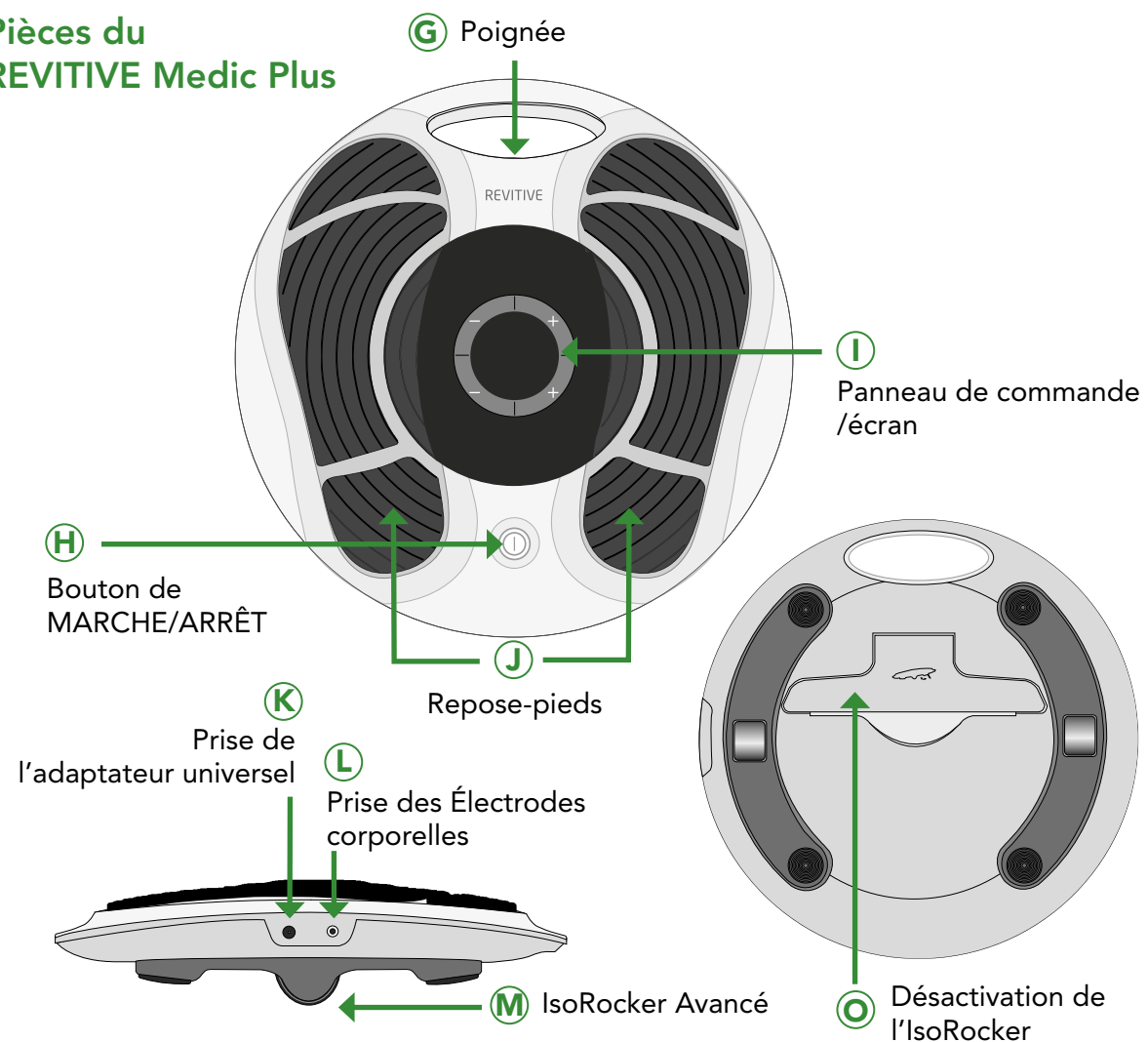

Commandes du REVITIVE Medic Plus

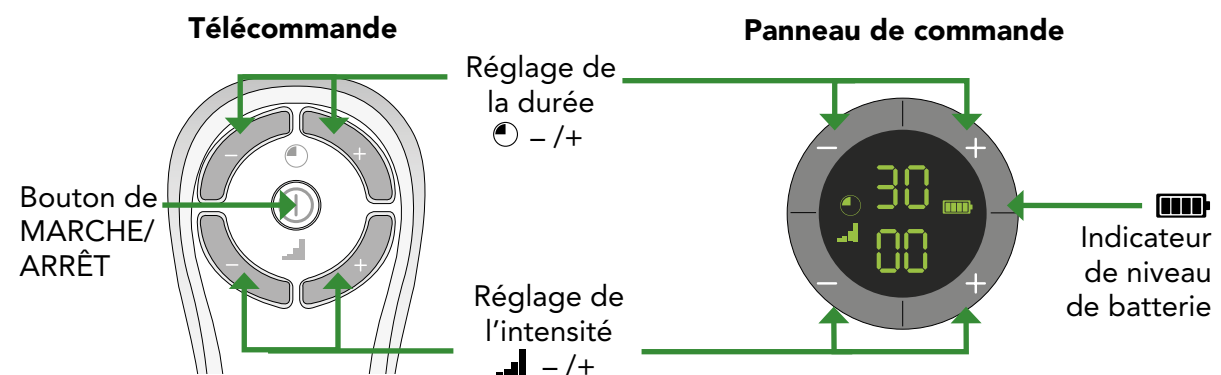

INDICATIONS D'UTILISATION

REVITIVE Medic Plus est conçu pour :

- Réduire le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds causée par l'immobilité résultant de l'ostéoarthrite ou d'une blessure
- Améliorer la circulation sanguine pour réduire ou prévenir l'accumulation de sang (stase) causée par le diabète ou par l'immobilité après une chirurgie
- Soulager la douleur et l'inconfort dans les jambes, les chevilles et les pieds causés par une neuropathie périphérique diabétique ou le gonflement (œdème) résultant de l'ostéoarthrite ou après une chirurgie
- Renforcer les muscles pour contribuer au regain de mobilité dans les jambes affectées par l'immobilité résultant de la BPCO, de l'ostéoarthrite ou d'une chirurgie
- Contribuer à la santé veineuse des jambes par l'augmentation de la circulation en transportant plus de sang oxygéné et en réduisant le gonflement (œdème) dans les jambes, les pieds et les chevilles

Les indications d'utilisation ci-dessus sont homologuées par SGS United Kingdom Limited NB0120 en vertu du Medical Devices Directive 93/42/EEC.

De plus, si vous avez un mode de vie sédentaire ou avez de longues périodes d'inactivité, REVITIVE Medic Plus pourrait :

- Soulager la douleur aux jambes et aux pieds
- Soulager la douleur neuropathique périphérique liée au diabète
- Réduire le gonflement des pieds et des chevilles
- Soulager les crampes aux jambes
- Renforcer les muscles des jambes
- Augmenter activement la circulation

COMMENT FONCTIONNE REVITIVE

REVITIVE délivre une Électrostimulation musculaire (EMS) à vos pieds par l'intermédiaire d'une paire de repose-pieds rembourrés, pendant que vous êtes assis. L'électrostimulation provoque la contraction des muscles de vos mollets et de vos pieds, ce qui participe à augmenter la circulation dans la partie inférieure des jambes.

REVITIVE Medic Plus a été développé pour un grand confort d'utilisation. Il comporte également un IsoRocker (brevet en cours) qui assure le mouvement naturel de l'articulation de la cheville lorsque la stimulation électrique est appliquée au niveau de vos pieds. Le mouvement de l'articulation est un facteur essentiel pour l'amélioration de la circulation veineuse de la partie inférieure des jambes. Vous pouvez choisir de bloquer ou débloquer le système IsoRocker à tout moment.

REVITIVE Medic Plus est conçu pour être facile à utiliser et est fourni avec une télécommande; vous n'avez donc pas à vous pencher pour ajuster les différents paramètres pendant que vous l'utilisez.

REVITIVE Medic Plus peut également délivrer une stimulation électrique au niveau des genoux, des épaules, du dos et des bras, par l'intermédiaire des Électrodes corporelles fournies.

Rendez-vous sur www.revitive.fr ou www.revitive.be pour plus d'informations

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

QUAND NE PAS UTILISER REVITIVE?

REVITIVE ne doit **pas** être utilisé par certaines personnes.



Ne pas utiliser dans les cas suivants (contre-indications) :

- Port d'un dispositif électronique implanté tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur cardiovertteur implantable automatique (DCIA)
- Si vous êtes enceinte
- Traitement ou symptômes relatifs à une thrombose veineuse profonde (TVP) existante

Les longues périodes d'inactivité vous font courir un plus grand risque de développer une thrombose veineuse profonde (TVP). Une TVP se caractérise par un caillot de sang qui se forme généralement dans les veines profondes des jambes. En se détachant, une partie de la TVP risquerait d'entraîner des complications dangereuses telles qu'une embolie pulmonaire.

Si vous avez été inactif pendant des périodes prolongées, et vous pensez peut-être souffrir d'une TVP, consultez immédiatement votre médecin. Pour éviter le déplacement du caillot, n'utilisez pas REVITIVE.

Certaines TVP ne présentent aucun symptôme. Cependant, il est important de noter que les symptômes peuvent inclure :

- une douleur, un gonflement ou une sensibilité au niveau d'une jambe (en général dans le mollet)
- une douleur sourde au niveau de la zone concernée
- une peau plus chaude dans la zone du caillot
- une rougeur de la peau, en particulier à l'arrière de la jambe, au-dessous du genou

Consultez votre médecin dès que possible si vous remarquez l'un des symptômes ci-dessus.



Avertissements

- Si vous avez des antécédents médicaux de problèmes cardiaques, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous avez des doutes quant à l'utilisation du REVITIVE dans votre cas ou quant à la cause de vos symptômes, vous devriez prendre conseil auprès de votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez **pas** les Électrodes corporelles sur la tête, le visage, le cou ou la poitrine.
- **Ne pas** appliquer les Électrodes corporelles directement :
 - sur des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, des zones enflées, rouges, infectées ou enflammées, ou des irrégularités de la surface cutanée (causées par une phlébite, une thrombophlébite, des varices ou de la cellulite - inflammation de la peau)
 - sur ou près de tumeurs malignes
 - sur une zone traitée par radiothérapie (au cours des 6 derniers mois)
 - sur les organes reproductifs
- N'utilisez **pas** les Électrodes corporelles après leur date de péremption.
- Il est possible que vous ressentiez une irritation cutanée ou des brûlures sous les Électrodes corporelles ou une hypersensibilité due à l'électrostimulation.
- Si vous ressentez un effet indésirable, arrêtez d'utiliser le REVITIVE et consultez votre médecin.

 **Mises en garde**

- Faites preuve de prudence quand vous utilisez la stimulation :
 - sur des zones cutanées dépourvues de sensations normales (attention de ne pas trop stimuler ces zones cutanées).
 - sur l'abdomen pendant les règles.
 - après une intervention chirurgicale récente, car la stimulation peut perturber la cicatrisation.
 - en cas de probabilité de saignements internes suite à une blessure ou à une fracture, utilisez une faible intensité et/ou utilisez l'appareil moins longtemps, pour éviter l'hyperstimulation.
 - après une longue période d'immobilité ou d'inactivité, utilisez une faible intensité et utilisez l'appareil moins longtemps, pour éviter l'hyperstimulation ou la fatigue musculaire.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles ne soient encadrées par une personne responsable de leur sécurité.

 **Précautions de sécurité**

- **Ne vous tenez pas debout sur l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.**
- Utilisez cet appareil uniquement selon l'usage pour lequel il est prévu.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne renversez pas de liquide sur l'appareil ou ses accessoires.
- Ne surchargez pas la prise électrique.

- Cet appareil n'est pas adapté à l'utilisation par les enfants.
- N'utilisez le REVITIVE Medic Plus qu'avec les accessoires fournis ou achetés auprès du fabricant.
- N'ouvrez pas le REVITIVE Medic Plus, ne le réparez pas vous-même. Cela annulerait la garantie et pourrait causer des blessures graves.
- Au cas peu probable où votre appareil REVITIVE présenterait un dysfonctionnement, débranchez-le de la source d'alimentation et prenez immédiatement contact avec votre agent agréé.
- Il a été signalé que certaines télécommandes universelles (p. ex. pour la télévision, etc.) peuvent modifier les réglages de REVITIVE si elles sont utilisées pendant un traitement. Si cela se produit, réglez simplement le temps ou l'intensité de votre appareil REVITIVE sur les valeurs désirées à l'aide de la télécommande REVITIVE ou du panneau de contrôle de l'appareil.
- Après toute exposition à des températures excédant la zone recommandée allant de 10 - 40 °C, laissez le produit se réajuster aux températures de fonctionnement recommandées pour assurer un fonctionnement optimal.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Pendant combien de temps dois-je utiliser REVITIVE?

Il est recommandé d'utiliser le REVITIVE 20 à 30 minutes par jour.


N'utilisez pas le REVITIVE pendant plus de 6 sessions de 30 minutes (ou équivalent) par jour. Cela peut provoquer une fatigue musculaire.

ÉTAPE 1 : RÉGLER LE REVITIVE MEDIC PLUS POUR LA PREMIÈRE FOIS

a Retirez toutes les pièces du carton :

- Adaptateur universel
- REVITIVE Medic Plus
- Électrodes corporelles
- Cordon des électrodes corporelles
- Télécommande
- 2 x piles AAA

Consulter la section «Que contient cette boîte?» aux pages 4 et 5 pour l'identification des pièces.




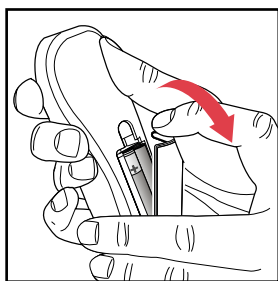


b Trouver la télécommande et insérer les piles.

Avant d'utiliser REVITIVE Medic Plus pour la première fois, lire les «Avertissements et mises en garde» aux pages 8 à 11. En cas de doute, consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.

ÉTAPE 2 : RÉGLER REVITIVE POUR SON UTILISATION

- a Retournez l'appareil pour voir le système IsoRocker et le bloqueur de ce système.
- Le système IsoRocker permet au REVITIVE Medic Plus de basculer tout en stimulant vos jambes et vos pieds.
 - Le REVITIVE Medic Plus commencera à basculer sur l'IsoRocker dès que les contractions musculaires seront assez fortes.
 - Le système IsoRocker peut être désactivé en ouvrant le bloqueur de l'IsoRocker. Le REVITIVE Medic Plus sera alors en mode statique et ne bougera pas pendant son utilisation.

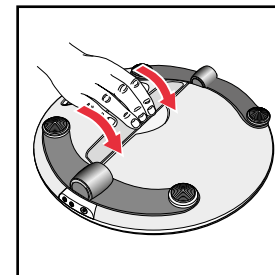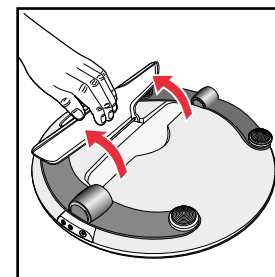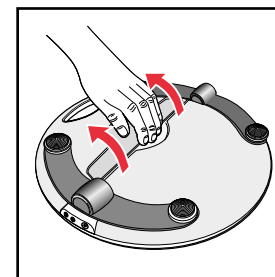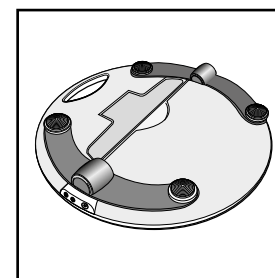

b Si vous **voulez utiliser l'IsoRocker**, laissez le bloqueur en place (c.-à-d. à plat) au dos de l'appareil, comme illustré ci-contre.

c Si vous **ne voulez pas utiliser l'IsoRocker**

- Ouvrez le bloqueur du système IsoRocker au dos du REVITIVE Medic Plus. Il vous faudra peut-être tirer fort.
- Tirez le bloqueur du système IsoRocker jusqu'à ce qu'il s'ouvre et que vous entendiez un clic, comme illustré ci-contre.
- Pour activer à nouveau le système IsoRocker, tirez le bloqueur et remettez-le en place au dos de l'appareil (c.-à-d. à plat).

ÉTAPE 3 : ALLUMER L'APPAREIL REVITIVE MEDIC PLUS

REVITIVE Medic Plus peut être allumé soit à partir de la batterie rechargeable, soit en le branchant à une prise électrique.

MISE EN MARCHÉ AVEC LA BATTERIE

Si vous souhaitez utiliser l'appareil sans le brancher, il peut fonctionner à l'aide de la batterie.

Lorsque l'appareil fonctionne à partir de la batterie, un voyant lumineux indique le niveau de charge.

Batterie chargée → Batterie faible



Aller à l'étape 4 «Utiliser les repose-pieds» ou à l'étape 5 «Utiliser les Électrodes corporelles» pour continuer l'installation de REVITIVE Medic Plus.


Lorsque la batterie atteint le niveau faible, il faut la recharger. Voir l'étape 6 «Recharger la batterie» à la page 24.

Si, lorsque vous éteignez l'appareil, l'indicateur de charge de batterie clignote pendant 10 secondes, la batterie doit être rechargée.


Veillez noter que si la batterie s'épuise, vous pouvez quand même utiliser l'appareil. Il suffit de le brancher à une prise électrique.

MISE EN MARCHÉ PAR BRANCHEMENT

Si vous souhaitez utiliser REVITIVE Medic Plus lorsque la batterie est faible ou pour économiser sa charge, brancher l'appareil à une prise électrique.

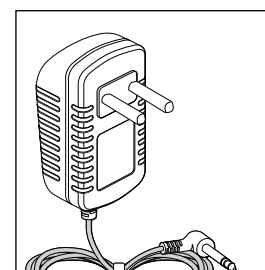

a Trouver l'adaptateur de courant universel.

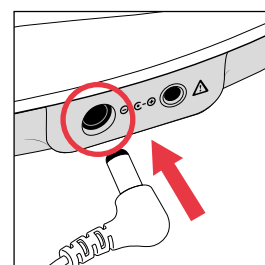


b Brancher le petit bout du cordon dans la prise sur le côté de l'appareil REVITIVE Medic Plus.

c Brancher l'adaptateur dans la prise de courant la plus proche. Cela lancera la recharge de la batterie rechargeable (intégrée).

Une fois l'appareil REVITIVE branché, aller à l'étape 4 «Utiliser les repose-pieds» ou à l'étape 5 «Utiliser les Électrodes corporelles» pour continuer l'installation de REVITIVE Medic Plus.

Asseyez-vous et placez les pieds nus sur les repose-pieds

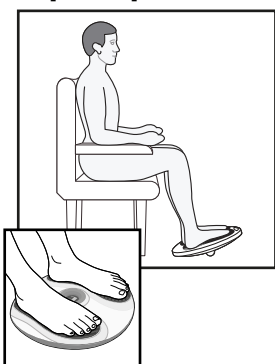



ÉTAPE 4 : UTILISER LES REPOSE-PIEDS



- a** Trouvez une position assise confortable.
Pour obtenir de meilleurs résultats, asseyez-vous avec les genoux à 90 degrés (angle droit).
- b** Placez le REVITIVE sur le sol devant vous.

Le REVITIVE est conçu pour être utilisé en position assise.
Ne vous tenez jamais debout sur l'appareil REVITIVE.

- c** Placez les deux pieds nus sur les repose-pieds.
Assurez-vous d'avoir enlevé vos chaussures, chaussettes ou collants.
- d** Si vous le souhaitez, appliquez une crème hydratante sur la plante des pieds.



Astuce : le fait d'appliquer une crème hydratante sur la plante des pieds avant d'utiliser le REVITIVE peut aider à améliorer la stimulation électrique.

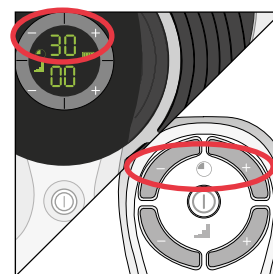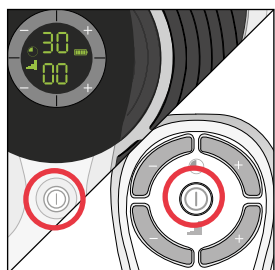- e** Pour allumer le REVITIVE, appuyez sur le bouton MARCHÉ de l'appareil, ou de la télécommande.
Vous entendez un bip et l'écran s'allume. Le temps  indique 30 minutes et l'intensité  indique 00.
- Pour éteindre le REVITIVE à tout moment, appuyez sur le bouton de marche/arrêt de l'appareil, ou de la télécommande.




- f** Régler la durée de la séance du REVITIVE Medic Plus. La durée programmée par défaut est 30 minutes. Vous pouvez régler la minuterie jusqu'à 60 minutes. Si vous ne souhaitez pas utiliser la durée préprogrammée de 30 minutes, régler la durée en fonction de l'utilisation souhaitée.

Utiliser les boutons du tableau de commande **ou** de la télécommande.

Appuyer sur le bouton  (+) pour augmenter la durée.
Appuyer sur le bouton  (-) pour réduire la durée.


NB Il est recommandé d'utiliser REVITIVE de 20 à 30 minutes par jour.

Ne pas utiliser REVITIVE plus de 6 séances de 30 minutes (ou l'équivalent) par jour. Cela pourrait provoquer de la fatigue musculaire.

- g** Appuyez sur la touche d'intensité  (+) une fois, pour commencer la stimulation.
- Continuez à augmenter l'intensité jusqu'à ce que vous ressentiez ou voyiez les muscles de vos pieds et mollets se contracter et se détendre. Vous pouvez régler l'intensité de 1 à 99.

Utiliser les boutons du tableau de commande **ou** de la télécommande.


Appuyer sur la touche (+) pour augmenter l'intensité.
Appuyer sur la touche (-) pour réduire l'intensité.

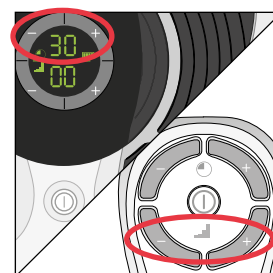



- h** Utilisez une intensité qui provoque chez vous des contractions musculaires fortes, mais confortables; notez que l'intensité requise peut varier d'un jour à l'autre, p. ex. le fait d'utiliser une intensité de 25 un jour ne veut pas forcément dire que vous aurez besoin d'utiliser ce même niveau le lendemain. Le niveau d'intensité requis peut être plus élevé ou moins élevé que lors de l'utilisation précédente.

Il est normal de sentir des fourmillements ou des sensations diverses dans les muscles des mollets.

Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort :

- Retirer un pied ou les deux des repose-pieds pour arrêter la stimulation.
- Diminuer l'intensité des repose-pieds en appuyant sur le bouton  (-) de réglage de l'intensité du tableau de commande ou de la commande à distance, puis replacer les pieds sur l'appareil.


Le REVITIME n'est pas censé vibrer.

- i** L'affichage du temps  commence le compte à rebours en minutes dès que l'appareil effectue le cycle de son programme.
- j** Quand la séance du REVITIME Medic Plus arrive à sa fin, l'affichage du temps  indique (00) et vous entendez trois bips retentir.
- k** Le REVITIME s'éteint automatiquement.


ÉTAPE 5 : UTILISATION DES ÉLECTRODES CORPORELLES

Le REVITIME Medic Plus est fourni avec une paire d'Électrodes corporelles réutilisables (entre 20 et 30 applications maximum) qui peuvent être utilisées pour stimuler les muscles au niveau du dos, des épaules, des cuisses, des genoux ou des bras.



- a** Sélectionnez la partie du corps à laquelle vous souhaitez appliquer l'électrostimulation:
- ✓ Exemples de positionnement des Électrodes corporelles présentés ci-dessous :

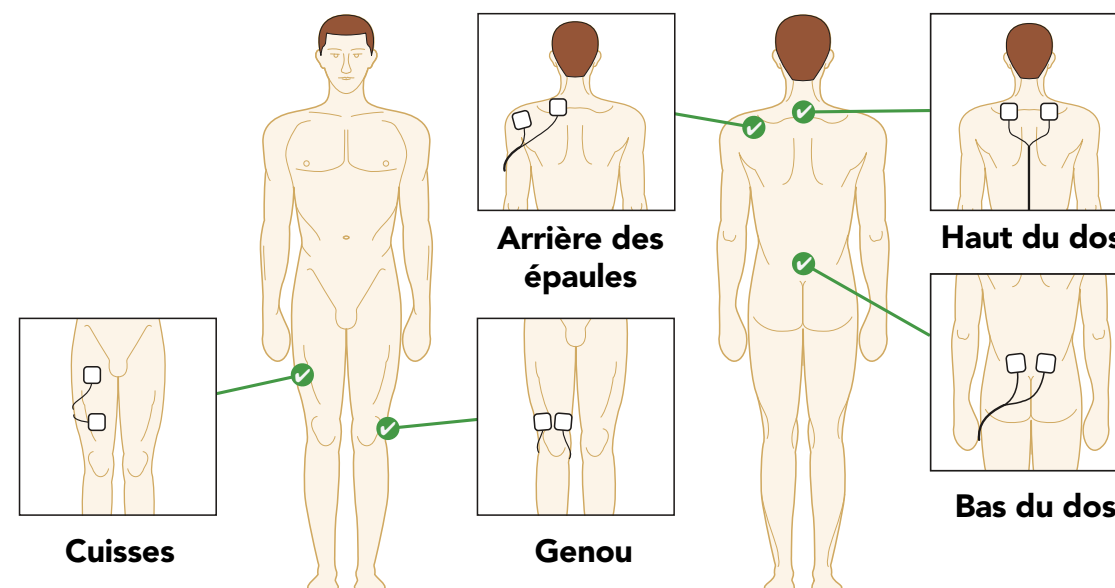

N'utilisez PAS les Électrodes corporelles sur la tête, le visage, le cou ou la poitrine.

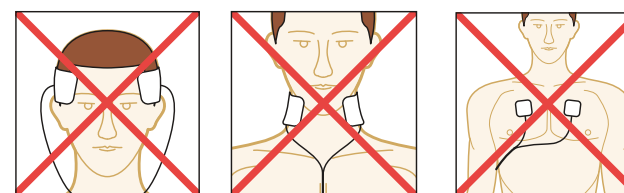


- b** Lavez et séchez la zone sur laquelle vous allez placer les électrodes corporelles.
- c** Assurez-vous que le REVITIVE est éteint. Si le panneau de contrôle est encore éclairé, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et éteignez le REVITIVE.
- d** Raccordez les électrodes corporelles à leur cordon.

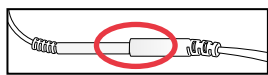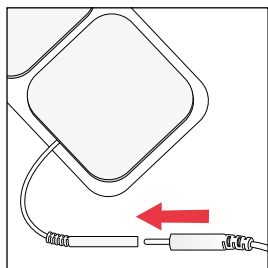


Appuyez sur les connecteurs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux.

Le fait de laisser un espace peut provoquer une gêne.

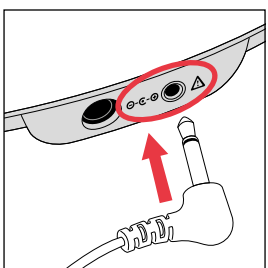


- e** Branchez l'autre extrémité du cordon des électrodes dans l'ouverture sur le côté du REVITIVE Medic Plus.


Le raccordement des Électrodes corporelles éteint automatiquement les repose-pieds et l'intensité est remise à zéro.

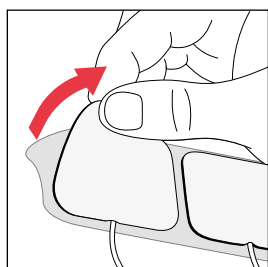

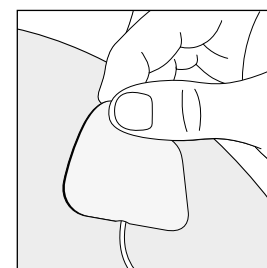


- f** Retirez soigneusement le film protecteur des électrodes. Replacez les Électrodes sur le film protecteur en plastique après utilisation.

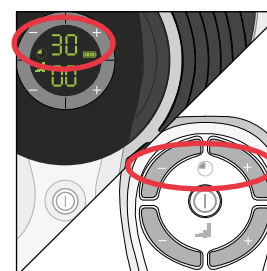

- g** Pressez les Électrodes sur la zone à stimuler, comme indiqué à la page 18, en pressant doucement la face adhésive contre la peau.





- h** Pour allumer le REVITIVE, appuyez sur le bouton MARCHÉ de l'appareil, ou de la télécommande. Vous entendez un bip et l'écran s'allume. Le temps indique 30 minutes et l'intensité  indique 00. Pour éteindre le REVITIVE à tout moment, appuyez sur le bouton de marche/arrêt de l'appareil, ou de la télécommande.

- i** Régler la minuterie selon la durée d'utilisation voulue. La durée programmée par défaut est 30 minutes. Vous pouvez régler la minuterie jusqu'à 60 minutes. Utiliser les boutons du tableau de commande **ou** de la télécommande. Appuyer sur le bouton  (+) pour augmenter la durée. Appuyer sur le bouton  (-) pour diminuer la durée.

NB Il est recommandé d'utiliser REVITIVE de 20 à 30 minutes par jour.

Ne pas utiliser REVITIVE plus de 6 séances de 30 minutes (ou l'équivalent) par jour. Cela pourrait provoquer de la fatigue musculaire.

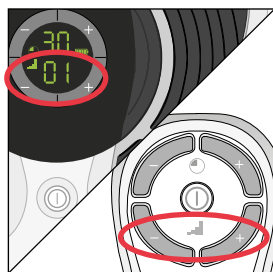


- j** Appuyez sur la touche d'intensité  (+) une fois, pour commencer la stimulation.

Continuez à augmenter l'intensité jusqu'à ce que vous ressentiez ou voyiez vos muscles se contracter et se détendre. Vous pouvez régler l'intensité de 1 à 99.

Vous pouvez utiliser les touches de l'appareil **ou** de la télécommande.


Appuyez sur la touche (+) pour augmenter l'intensité.

Appuyez sur la touche (-) pour réduire l'intensité.

- k** Appuyez sur le bouton  (+) de réglage de l'intensité jusqu'au niveau désiré.

Utilisez une intensité qui provoque chez vous des contractions musculaires fortes, mais confortables ; notez que l'intensité requise peut varier d'un jour à l'autre, p. ex. le fait d'utiliser une intensité de 25 un jour ne veut pas forcément dire que vous aurez besoin d'utiliser ce même niveau le lendemain. Le niveau d'intensité requis peut être plus ou moins élevé que lors de l'utilisation précédente.

Il est normal de sentir des fourmillements ou des sensations diverses dans les muscles des mollets.

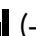Si vous ressentez des douleurs ou une gêne, réduisez l'intensité de la stimulation au niveau des Électrodes corporelles en appuyant sur la touche d'intensité  (-) du panneau de commande ou de la télécommande.

- l** La minuterie/affichage du temps commence le compte à rebours en minutes dès que le REVITIVE Medic Plus effectue le cycle de son programme.
- m** Quand la séance du REVITIVE arrive à sa fin, l'affichage du temps indique (00), vous entendez trois bips retentir, et l'appareil s'éteint automatiquement.

- n** REVITIVE Medic Plus s'éteint de lui-même automatiquement.




- o** Assurez-vous que l'appareil s'est éteint automatiquement, et décollez soigneusement les électrodes corporelles de la peau.

Ne retirez pas les Électrodes corporelles en tirant sur les cordons, car cela risque de les endommager.

- p** Remplacez les Électrodes sur le film protecteur en plastique après utilisation.

- q** Débranchez le cordon des Électrodes corporelles de la prise sur l'appareil.


Il n'est pas nécessaire de détacher les Électrodes corporelles de leur cordon.

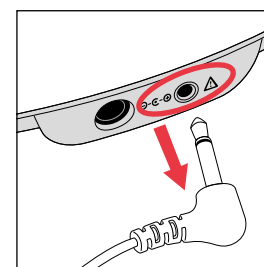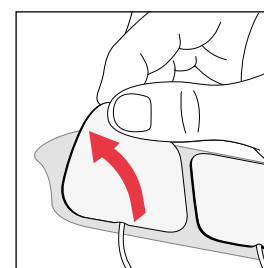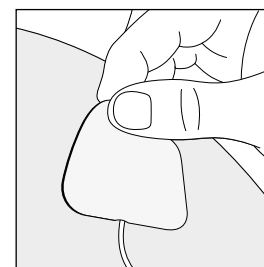


Important: Les repose-pieds ne produiront pas de stimulation lorsque les Électrodes Corporelles sont branchées.

ÉTAPE 6 : RECHARGER LA BATTERIE

REVITIVE Medic Plus peut être allumé soit à partir de la batterie rechargeable, soit par branchement à une prise électrique.

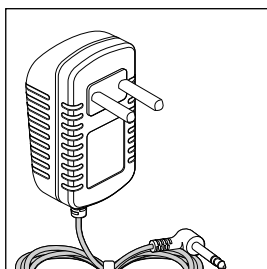

- a Trouver l'adaptateur de courant universel.

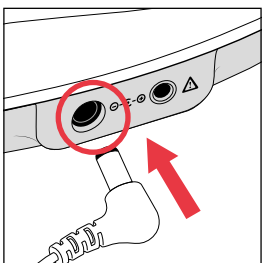

- b Brancher le petit bout du cordon dans la prise sur le côté de l'appareil REVITIVE Medic Plus.

- c Brancher l'adaptateur dans la prise de courant la plus proche. Cela lancera la recharge de la batterie rechargeable (intégrée).



Une recharge complète prend environ 3 heures.

- d Une fois la batterie rechargée, l'indicateur de batterie chargée restera allumé jusqu'au débranchement de l'adaptateur de l'appareil ou de la prise électrique.
Une batterie entièrement chargée permet environ 3½ heures d'utilisation (l'équivalent de 30 minutes par jour pendant une semaine).

Veillez noter que vous pouvez utiliser l'appareil pendant la recharge, mais que l'indicateur de charge de batterie ne s'allumera pas.

ÉTAPE 7 : NETTOYAGE ET RANGEMENT DE REVITIVE







- a Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et éteignez REVITIVE, si nécessaire.
- b Essuyez les repose-pieds avec un chiffon humide.
N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
N'immergez pas le REVITIVE dans l'eau.
- c Rangez le REVITIVE dans un endroit frais, sec et sans poussière. Rangez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
- d Remplacez les Électrodes corporelles sur le film protecteur en plastique.
- e Rangez les électrodes corporelles dans un endroit sec et aéré.
Rangez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
Il n'est pas nécessaire de détacher les Électrodes corporelles de leur cordon pour les ranger.

Remplacer les piles

La télécommande requiert deux piles AAA de 1,5 V pour fonctionner.





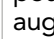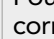




Remplacer les Électrodes corporelles







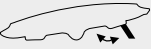


Les Électrodes sont réutilisables entre 20 et 30 fois. Si les Électrodes corporelles deviennent moins adhésives, étalez quelques gouttes d'eau sur leur surface. Des Électrodes corporelles de rechange peuvent être obtenues sur le site www.revitive.fr

Problème	Cause possible	Solution
REVITIVE Medic Plus est en marche (l'affichage LED s'éclaire), mais je ne ressens pas les impulsions électriques sur les repose-pieds.	Les deux pieds nus ne sont pas placés sur les repose-pieds en même temps.	Assurez-vous d'être pieds nus et d'avoir un pied sur chacun des repose-pieds en même temps. Continuez à augmenter l'intensité  jusqu'à 99 maximum, jusqu'à ce que vous ressentiez une stimulation.
	Vos pieds sont peut-être secs.	Hydratez la plante de vos pieds pour améliorer la conductivité et la stimulation, et essayez à nouveau. Il vous faudra peut-être aussi augmenter le niveau d'intensité  .
	Vous êtes peut-être déshydraté(e).	Buvez beaucoup d'eau avant et après l'utilisation de l'appareil. L'appareil se sert de votre corps pour créer un circuit électrique. L'eau est un excellent conducteur électrique, et si votre corps est moins hydraté (à moins de 60 %), la stimulation sera peut-être plus faible. Il est donc important de toujours bien s'hydrater.
	L'intensité  est peut-être réglée sur un niveau trop bas.	Cet appareil est particulièrement sûr. Continuez à augmenter le niveau d'intensité  vers 99, jusqu'à ce que vous ressentiez une stimulation. Vous pourrez constater qu'il vous faudra augmenter le niveau d'intensité  à mesure que vous vous habituez au traitement. L'objectif n'est pas d'atteindre le niveau 99, mais de trouver un réglage qui vous convient.
	Le cordon des Électrodes corporelles est branché dans l'appareil.	Déconnectez le cordon des électrodes corporelles ; les repose-pieds ne fonctionneront pas tant que ce cordon est branché.
	Si, après avoir essayé les solutions ci-dessus, vous ne ressentez toujours pas la stimulation :	Pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement, placez une main sur les deux repose-pieds en même temps pour boucler le circuit (cela est plus facile au niveau des parties destinées aux talons). De l'autre main et en commençant à zéro, augmentez le niveau d'intensité  jusqu'à ce que vous ressentiez la stimulation. Si vous pouvez ressentir une stimulation dans vos mains, cela signifie que l'appareil fonctionne. Si, à 99, vous ne pouvez toujours pas ressentir de stimulation, adressez-vous à votre distributeur agréé.

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'alimentation ni de voyants allumés sur le REVITIVE Medic Plus quand on le met en marche.	L'adaptateur universel n'est pas allumé sur la prise secteur ou n'est pas correctement branché dans l'appareil.	Vérifiez que l'alimentation de la prise de courant fonctionne et que l'adaptateur est correctement branché sur l'appareil. Si le problème persiste, contactez un agent agréé.
	La batterie est faible	Branchez l'appareil à une prise électrique pour recharger la batterie ou utilisez l'appareil branché directement à une prise de courant.
REVITIVE Medic Plus ne vibre pas.	REVITIVE Medic Plus N'EST PAS CONÇU POUR VIBRER.	
L'IsoRocker ne bascule pas.	Ce sont les muscles de vos jambes qui créent le mouvement, l'ISOROCKER N'EST PAS MÉCANIQUE.	L'IsoRocker ne bascule que lorsqu'il est réglé sur une intensité qui cause une contraction suffisante des muscles des mollets. Il se peut que vous ne puissiez pas confortablement augmenter l'intensité  à un niveau suffisant, pour vous habituer à la sensation. Il est important que l'intensité soit réglée à un niveau confortable.
	L'appareil est posé trop loin devant vous.	Asseyez-vous avec les genoux à 90 degrés.
	L'IsoRocker n'est pas activé.	Vérifiez que le bloqueur du système IsoRocker se trouve en position centrale (voir page 13).
Mes jambes sont douloureuses suite au traitement.	Vous avez peut-être réglé l'intensité  sur un niveau trop élevé, et vos muscles ont trop travaillé.	Laissez assez de temps entre chaque traitement pour permettre à vos muscles de récupérer (comme après un exercice vigoureux). Lors de votre prochaine séance, commencez à un niveau plus bas (pour ressentir une stimulation électrique légère et confortable) et réduisez la durée jusqu'à ce que vos muscles soient habitués à la stimulation.
Lorsque l'IsoRocker est utilisé sur un sol dur, il produit un bruit de battement.	Mauvais positionnement de l'appareil ou intensité trop élevée.	Réglez le positionnement de l'appareil ou diminuez l'intensité afin de réduire le bruit. Vous pouvez également utiliser un tapis de sol sous l'appareil afin d'atténuer le bruit.

Pour plus d'informations, y compris la Foire aux questions, rendez-vous sur www.revitive.fr ou www.revitive.be

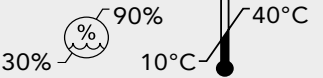Nom du produit	REVITIVE Medic Plus
Modèle	2469MD
Fréquence	1Hz – 50Hz
Courant de sortie	Max 15mA
Poids	1,5 kg
Dimensions (IsoRocker activé et désactivé)	activé : 355 (L) x 355 (H) x 75 (P) mm désactivé : 355 (L) x 355 (H) x 90 (P) mm
Consommation d'énergie	5 W
Adaptateur universel	Approuvé par CE
Source d'alimentation Entrée (avec adaptateur) ⚡ Sortie ⚡	100-240V ~ AC (-⊕), 50/60Hz, 0.18A 5V (⊕) DC - - -, 1.0A
Contre-indications Situations où vous ne devriez pas utiliser REVITIVE	
Avertissements et mises en garde Assurez-vous de comprendre ces mesures de sécurité avant d'utiliser REVITIVE	
Marche	
Temps restant	
Niveau d'intensité	
Indicateur de charge de batterie	
Désactivation du IsoRocker	
Polarité inverse	
Matériel électrique médical de type BF	

Appareil électrique médical de classe II à double isolation	
Conforme à la directive européenne relative aux appareils médicaux (93/42/EEC)	 0120
Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À la fin du cycle de vie du produit, ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères ordinaires, mais apportez-le à un centre de recyclage des équipements électroniques.	
Fabricant légal de l'appareil	
Conserver au sec	
Veillez consulter les directives d'utilisation	
Le LOT et le numéro de série de l'appareil affichant l'année (AAAA) et le mois (MM) de fabrication se trouvent sur la boîte et au dos de l'appareil.	LOT #AAAAMMXXXXX
Seuils d'humidité et de température pour le stockage Après toute exposition à des températures excédant la zone recommandée allant de 10 - 40 °C, laisser le produit se réajuster aux températures de fonctionnement recommandées pour assurer un fonctionnement optimal.	
Usage intérieur uniquement	
Ne pas démonter	
La commande à distance comporte les mêmes commandes que le tableau de l'appareil	
Fréquences de fonctionnement	38 KHz
Distance de fonctionnement	0 à 25 m à l'horizontal - 0 à 18 m à un angle de +/- 30 degrés de l'horizontal.

Il est important de conserver votre facture ou ticket de caisse comme preuve d'achat. Agrafez votre facture ou ticket de caisse au dos de la couverture de ce manuel pour toute référence ultérieure.

Veillez fournir les renseignements suivants en cas de panne du produit. Ces références sont situées sur la base du produit :

Modèle n° :

Lot n° :

Tous les appareils REVITIVE sont testés individuellement avant de quitter l'usine. En cas de défaut ou de panne dans les 30 jours de l'achat d'un appareil, celui-ci devra être retourné au point de vente pour être échangé.

En cas de panne au-delà des 30 jours, mais dans les 24 mois suivant l'achat initial, contactez votre distributeur le plus proche en mentionnant le numéro de lot et de modèle du produit, ou envoyez un courrier à votre distributeur à l'adresse indiquée.

Vous devrez alors renvoyer le produit (dans un emballage adapté et sécurisé) à l'adresse indiquée, accompagné d'une copie de la preuve d'achat.

Conformément aux exclusions définies ci-dessous (voir Exclusions), tout appareil défectueux, une fois reçu, sera remplacé et envoyé généralement sous 14 jours (ouvrables).

Si pour quelque raison que ce soit, cet article venait à être remplacé durant les 2 années de la garantie, la garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date d'achat d'origine. Il est donc essentiel que vous conserviez le ticket de caisse ou la facture d'origine indiquant la date d'achat initiale.

Pour bénéficier d'une garantie de 2 ans, votre appareil doit avoir été utilisé conformément aux instructions du fabricant qui vous ont été fournies.

EXCLUSIONS:

- 1 En tant que fabricant des appareils REVITIVE, Actegy Ltd décline toute responsabilité en ce qui concerne le remplacement de ses produits selon les termes de la garantie, lorsque :
 - La panne a été causée ou provient d'une utilisation accidentelle, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une utilisation contraire aux recommandations du fabricant ; ou lorsque la panne provient d'une surtension ou de dommages lors du transit.
 - L'appareil a été utilisé sur une tension autre que celle indiquée sur le produit ou avec un adaptateur différent de celui fourni avec le produit.
 - Des réparations ont été réalisées par des personnes autres que notre personnel de maintenance (ou revendeur agréé).
 - L'appareil a été utilisé dans le cadre d'une location ou pour une utilisation non domestique.
 - Il s'agit d'un appareil d'occasion.
- 2 Actegy Ltd n'est pas responsable des travaux d'entretien, au titre de cette garantie.
- 3 Les accessoires tels que les Électrodes corporelles ne sont pas couverts par la garantie.
- 4 Les piles ou batteries et les dommages occasionnés par des fuites ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie ne confère aucun autre droit que ceux stipulés expressément ci-dessus et ne couvre aucune réclamation en cas de pertes ou dommages indirects. Cette garantie est une couverture supplémentaire, elle n'affecte pas vos droits statutaires en tant que consommateur.

Wat zit er in de doos?	32
Onderdelen en knoppen	33
Introductie tot REVITIVE	34-35
Indicaties voor gebruik	34
Hoe REVITIVE Medic Plus werkt	35
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	36-39
Contra-indicaties	36
Waarschuwingen, risico's en voorzichtigheid geboden	37-39
Gebruiksaanwijzing	40-53
Hoe lang moet ik REVITIVE gebruiken?	40
Stap 1: REVITIVE Medic Plus voor de eerste keer opzetten	40
Stap 2: Het IsoRocker-systeem opzetten	41
Stap 3: REVITIVE Medic Plus voeden	42-43
Stap 4: De voetstappen gebruiken	44-46
Stap 5: De elektroden gebruiken	47-51
Stap 6: De batterij opladen	52
Step 7: Hygiëne en opbergen	53
De batterijen en elektroden vervangen	53
Problemen oplossen	54-55
Technische specificaties	56-57
Garantie	58

Pour activer votre garantie gratuite de 2 ans, veuillez enregistrer votre appareil sur le site Web REVITIVE.



 Actegy Ltd
REFLEX, Cain Road
Bracknell, RG12 1HL
United Kingdom

Distributeur/Vertriebhändler

Distec International sa/nv
Les portes de l'Europe
Rue Maurice Faure 1
1401 Nivelles
Belgique/België/ Belgien

www.distec.be



Copyright © 2015 Actegy Ltd. Tous droits réservés. ACTEGY®, REVITIVE™, Circulation Booster™ et IsoRocker™ sont des marques déposées d'Actegy Ltd. Ce produit REVITIVE est un design exclusif protégé par la législation applicable sur les dessins et modèles industriels.

Copyright © 2015 Actegy Ltd. Alle rechten voorbehouden. ACTEGY® en REVITIVE™, Circulation Booster™ en IsoRocker™ zijn gedeponeerde handelsmerken van Actegy Ltd. Het REVITIVE apparaat is een eigen ontwerp en is beschermd door de toepasselijke wetten op ontwerpgebied.

Copyright © 2015 Actegy Ltd. Alle Rechte vorbehalten. ACTEGY®, REVITIVE™, Circulation Booster™ und IsoRocker™ sind eingetragene Handelsmarken von Actegy Ltd. REVITIVE ist ein geschütztes Design und fällt unter die jeweils geltenden Musterrechte.

AW 2305_IFU01_11141378 PD 12.2015